
















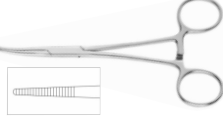
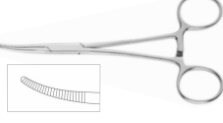


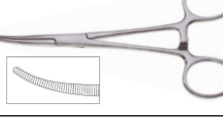

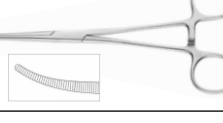
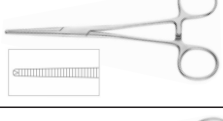
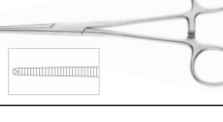
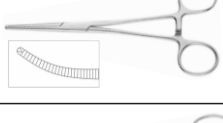






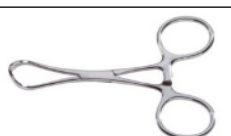









INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE BLACK & BLACK














Importador: Doctus Equipamentos Médicos LTDA

MANUAL DO USUÁRIO

Modelo	Nome	Especificação	Imagem Gráfica
B92291	Retrator Articulado Weitlainer Ponta Sem Corte	18cm (comprimento)	
B61213	Afastador de Auto-Retenção Holzhimer	10cm (comprimento)	
B61215	Retrator Articulado Weitlainer 11,5cm, Pontas Afiadas	11,5cm (comprimento)	
B61216	Retrator Articulado Weitlainer 11,5cm, Pontas Pontiagudas	11,5cm (comprimento)	
B61219	Retrator Articulado Weitlainer Pontas 3x4	14cm (comprimento)	
B65099	Porta Agulha de Fáschia Endoforeheadreto, 15cm	15cm (comprimento)	
B65100	Porta Agulha para Abdomi- noplastia Reta, 32cm	32cm (comprimento)	
B60300	Pinça Mosquito Hartmann Reta, 9cm	9cm (comprimento)	
B60301	Pinça Mosquito Hartmann Curva, 9cm	9cm (comprimento)	
B60302	Pinça Mosquito Halstead Reta, 12,5cm	12,5cm (comprimento)	
B60303	Pinça Mosquito Halstead Curva, 12,5cm	12,5cm (comprimento)	
B60304	Pinça Mosquito Halstead Reta, 12,5cm, Dentes 1x2	12,5cm (comprimento)	
B60305	Pinça Mosquito Halstead Curvada, 12,5cm, Dentes 1x2	12,5cm (comprimento)	

Modelo	Nome	Especificação	Imagem Gráfica
B60308	Pinça Mosquito Delicada Reta, 11,5cm	11,5cm (comprimento)	
B60309	Pinça Mosquito Delicada Curvada, 11,5cm	11,5cm (comprimento)	
B60313	Pinça Kelly Reta, 14cm	14cm (comprimento)	
B60314	Pinça Kelly Curvada, 14cm	14cm (comprimento)	
B60316	Pinça Crile Reta, 14cm	14cm (comprimento)	
B60317	Pinça Crile Curvada, 14cm	14cm (comprimento)	
B60319	Pinça Crile Curvada, 16cm	16cm (comprimento)	
B60320	Pinça Rochester-Pean, Reta, 16cm	16cm (comprimento)	
B60322	Pinça Rochester-Pean, Curva, 16cm	16cm (comprimento)	
B60330	Pinça de Kocher Reta, Dentes 1x2, 14cm	14cm (comprimento)	
B60334	Pinça de Kocher Reta, Dentes 1x2, 16cm	16cm (comprimento)	
B60331	Pinça de Kocher Curvada, Dentes 1x2, 14cm	14cm (comprimento)	
B60335	Pinça de Kocher Curvada, Dentes 1x2, 16cm	16cm (comprimento)	

Modelo	Nome	Especificação	Imagem Gráfica
B60342	Pinça de Toalha Backhaus	9cm (comprimento)	
B60343	Pinça de Toalha Backhaus	14cm (comprimento)	
B60344	Pinça de Toalha Edna	10cm (comprimento)	
B60345	Pinça de Toalha Edna	14cm (comprimento)	
B60346	Pinça de Retenção Foerster	18cm (comprimento)	
B60347	Pinça de Retenção Foerster	24cm (comprimento)	
B60349	Pinça Allis 15cm, Dentes 4x5	15cm (comprimento)	
B60350	Pinça Allis 15cm, Dentes 5x6	15cm (comprimento)	
B67575	Pinça Hemostática Delicada Cox Curvada, 35cm	35cm (comprimento)	
B67576	Pinça Hemostática Delicada Cox Curvada, 30cm	30cm (comprimento)	
B60085	Pinça para Fragmentos 18cm	18cm (comprimento)	
B60310	Pinça para Maxilar Delicada Mosquito, Reta, 14,5cm	14,5cm (comprimento)	
B60311	Pinça para Maxilar Delicada Mosquito, Curvada, 14,5cm	14,5cm (comprimento)	

Modelo	Nome	Especificação	Imagem Gráfica
B60352	Braçadeira de Toalha não Cortante, 13,3cm	13,3cm (comprimento)	
B60358	Pinça Adson Curva Hemostática, 18,5cm	18,5cm (comprimento)	
B60363	Pinça Lahey Vulsellum 15cm	15cm (comprimento)	
B60365	Pinça de Apreensão Pitanguy 14cm	14cm (comprimento)	
B60677	Pinça de Septo Tebbetts Angular, 18,5cm	18,5cm (comprimento)	
B60736	Pinça Schnidt, 19,1cm	19,1cm (comprimento)	
B60760	Pinça Guyuron-Debakey Curva, 12,5cm	12,5cm (comprimento)	
B60852	Pinça Jansen Middleton, Mandíbula Fenestrada Grande, 19,5cm	19,5cm (comprimento)	
B60853	Pinça Jansen Middleton, Mandíbula Copo 19,5cm	19,5cm (comprimento)	
B60860	Pinça de Septo Asch 23cm	23cm (comprimento)	
B63010	Pinça Beyer Rongeur 18cm	18cm (comprimento)	
B63015	Pinça Tebbetts Rongeur 16cm	16cm (comprimento)	
B63050	Pinça Takahashi, 14cm	14cm (comprimento)	

Formas de apresentação comercial do produto

Cada modelo é fornecido individualmente em embalagem primária não estéril de polietileno, selada térmicamente, acondicionando uma unidade do produto com 01 rótulo original do fabricante.

Indicação de uso / finalidade

Os instrumentais cirúrgicos articulados não cortantes para cirurgia tem como finalidade realizar remoção, separação e deslocamento de tecidos oriundos no momento da cirurgia, como de exemplo tecido adiposo e/ou tecido cartilaginoso.

Princípio de funcionamento / mecanismo de ação

O instrumental ao entrar em contato com o tecido oriundo do procedimento cirúrgico faz a remoção ou separação de tecidos. Também tem a função de facilitar ao cirurgião, o deslocamento de tecidos para melhor visualização da região que está sendo feita a cirurgia.

Modo de uso do produto

Após o instrumental cirúrgico ter sido esterilizado corretamente, o profissional capacitado irá com precisão aproximar a extremidade distal do instrumental cirúrgico na região onde se deseja fazer a remoção ou separação dos tecidos cartilagosos, adiposos ou pele gerados no momento do procedimento cirúrgico. Após sua utilização, e encaminhar o instrumental cirúrgico para o processo de desinfecção e esterilização.

Composição

- Aço inoxidável DIN14021

Especificação técnica

Organoléptico:

Todos os modelos são de aço inoxidável DIN14021, de coloração prata.

Mecânicas:

Todos os modelos são: sólidos, de baixa elasticidade e plasticidade.

Microbiológicas:

Todos os modelos não são esterilizados pelo fabricante, antes da sua utilização é necessário realizar o processo de limpeza e esterilização do produto.

Produto não estéril

Método de esterilização:

Autoclave à Vapor

Vapor a 134°C, pressão máxima de 3 bar/

Tempo: por 5 - 8 minutos usando vácuo ou pré-vácuo fracionado.

Condições de armazenamento e transporte

Temperatura: -10°C a 60°C
Umidade relativa máxima: 90%
Evitar choques mecânicos

Condições para manipulação

Temperatura: 10°C a 60 °C
Umidade relativa: 30% à 90%
Evitar choques mecânicos;

Deve-se ter cuidado na manipulação dos instrumentais cirúrgicos no que tange suas pontas. Antes da utilização certificar que o instrumental cirúrgico foi esterelizado corretamente.

Após utilização encaminhar o produto para ser realizado a desinfecção e esterilização do mesmo. Devem ser seguidas as orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização da norma NBR 14332 (“instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável - orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização”).

Advertências / Precauções

Este produto deverá ser utilizado por profissional habilitado e com experiência em manipulação de instrumentais cirúrgicos. Os instrumentais não devem ser guardados nos mesmos locais onde se armazena produtos químicos, que podem exalar vapor corrosivo.

Todo instrumental cirúrgico deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado. A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza. Uma vez esterilizado, os instrumentais devem ser abertos somente no centro cirúrgico, em condições assépticas. Ao receber o material verificar se o instrumental cirúrgico encontra-se íntegro.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DA UTILIZAÇÃO

Informações gerais:

Nome técnico: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE

Fabricado por: BLACK & BLACK SURGICAL, INC.

Endereço: NO. 5238 ROYAL WOODS PKWY., STE.170, TUCKER,
GA – USA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Importado e distribuído por:

Doctus Equipamentos Médicos LTDA

CNPJ: 06696246/0001-26

Endereço: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526 – Boa Vista

CEP 82560-000 Curitiba – Paraná - Brasil

Telefone: +55 (41) 3357-9966

Responsável Técnico: Juliano Lindenberg Cordeiro CRF 21594PR

**ATENÇÃO: PRODUTO DE USO MÉDICO. DEVE SER UTILIZADO
POR PROFISSIONAL HABILITADO.**

VALIDADE: INDETERMINADO

REGISTRO ANVISA: 80690340028

Sandro Pilatti
Responsável Legal

Juliano Lindenberg Cordeiro
Responsável Técnico 21594/CRFPR