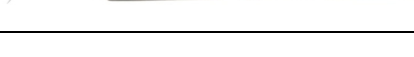


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
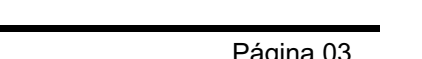


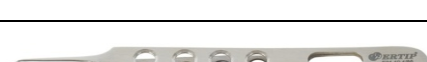
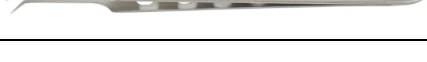
PINÇA PARA TRANSPLANTE CAPILAR ERTIP

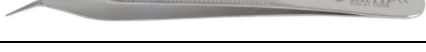
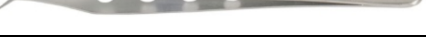
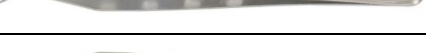
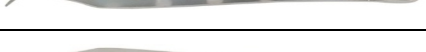
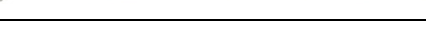
Importador: Doctus Equipamentos Médicos LTDA

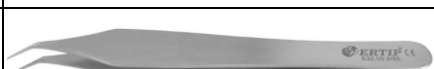
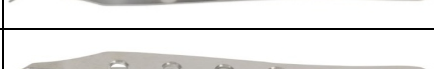
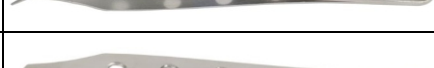
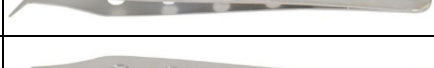
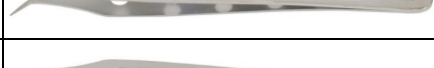
MANUAL DO USUÁRIO

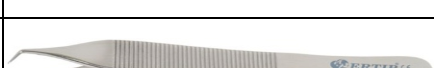
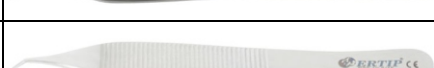
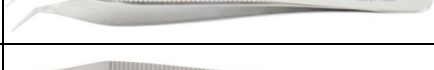
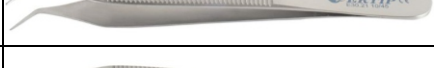
CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E20.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 4MM 40°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 4MM 45°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 4MM 55°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 5MM 40°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 5MM 45°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 5MM 55°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 7MM 40°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 7MM 45°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE 7MM 55°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 4MM 40°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 4MM 45°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 4MM 55°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 5MM 40°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 5MM 45°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 5MM 55°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

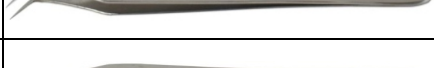
CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E20.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 7MM 40°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 7MM 45°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E20.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE COM FUROS 7MM 55°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 4MM 40°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 4MM 45°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 4MM 55°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 5MM 40°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 5MM 45°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 5MM 55°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 7MM 40°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 7MM 45°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E25.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CUSTOM DESIGN COM FUROS 7MM 55°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 4MM 40°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 4MM 45°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

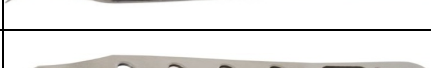
CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E21.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 4MM 55°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 5MM 40°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 5MM 45°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 5MM 55°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 7MM 40°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 7MM 45°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.03 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL 7MM 55°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 4MM 40°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 4MM 45°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 4MM 55°	4MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 5MM 40°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 5MM 45°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 5MM 55°	5MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

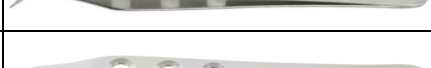
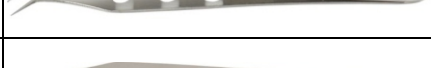
CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E21.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 7MM 40°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 7MM 45°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E21.13 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT MODEL COM FUROS 7MM 55°	7MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.39 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.39 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.39 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.40 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.40 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.40 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.41 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.41 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.41 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

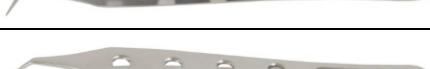
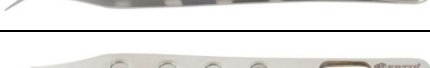
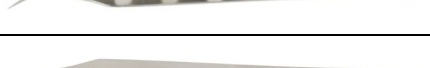
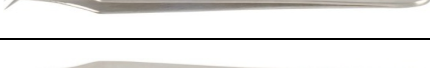
CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E32.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E31.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E31.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E31.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E32.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E38.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA COM FUROS 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E38.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SERRILHADA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.19 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.19 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.19 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.20 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.20 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.20 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.21 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.21 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.21 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E30.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E29.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E29.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E29.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E37.10 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.10 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.11 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.11 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.11 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.12 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.12 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.12 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL E FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.00 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.00 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.00 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.01 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.01 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.01 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.02 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.02 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E37.02 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE SOFT EXTRAÇÃO COM SERRILHA HORIZONTAL 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.29 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.29 PINÇA ERTIP PARA TRANS-PLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E30.29 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.30 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.30 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.30 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.31 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.31 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E30.31 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.09 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E35.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E34.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E34.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.11 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.12 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA COM FUROS 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 40°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 45°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 6MM 55°	6MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 40°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

CÓDIGO/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	IMAGEM ILUSTRATIVA
E36.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 45°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.01 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 8MM 55°	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 40°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 40°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 45°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E36.02 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE SOFT EXTRAÇÃO SEM SERRILHA 10MM 55°	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 55°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E45.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE RETO COM FUROS	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 0°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E40.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE RETO	8MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 0°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E44.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE RETO CUSTOM DESIGN COM FUROS	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 0°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E48.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE ADSON RETO	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 0°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E55.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CURVO COM FUROS	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E55.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CURVO COM FUROS SERRILHA HORIZONTAL	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E50.00 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CURVO	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	
E50.10 PINÇA ERTIP PARA TRANSPLANTE CURVO COM SERRILHA	10MM (COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO) X ANGULAÇÃO DE 45°	AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304	

Formas de apresentação comercial do produto

Cada modelo é fornecido individualmente em embalagem primária não estéril de polietileno, selada térmicamente, acondicionando uma unidade do produto com 01 rótulo original do fabricante.

Indicação de uso / finalidade

As pinças para transplante capilar tem como finalidade realizar remoção, separação, e deslocamento de tecidos oriundos no momento da cirurgia, como de exemplo derme e folículo piloso.

Princípio de funcionamento / mecanismo de ação

A pinça ao entrar em contato com o tecido oriundo do procedimento cirúrgico faz a remoção ou separação de tecidos e/ou folículo piloso.

Também tem a função de facilitar ao cirurgião, o deslocamento de tecidos para melhor visualização da região que está sendo feita a cirurgia.

Modo de uso do produto

Selacionar o modelo de acordo com a característica do couro cabeludo e folículo piloso. Após o instrumental cirúrgico ter sido esterilizado corretamente, o profissional capacitado irá com precisão aproximar a extremidade distal do instrumental cirúrgico na região onde se deseja fazer a remoção ou separação dos tecidos ou pele gerados no momento do procedimento cirúrgico.

Após a sua utilização, e encaminhar o instrumental cirúrgico para o processo de desinfecção e esterilização.

Composição

Aço Inoxidável Austenítico 304

Especificação técnica

Dimensional:

Ver tabela comparativa de modelos

Organoléptico:

Todos os modelos são de aço inoxidável 304, de coloração prata; o aço inoxidável austenítico 304 tem excelente resistência à corrosão quando entra em contato com diferentes meios corrosivos.

Mecânicas:

Todos os modelos são: sólidos, de baixa elasticidade e plasticidade

Microbiológicas:

Todos os modelos não são esterilizados pelo fabricante, antes da sua utilização é necessário realizar o processo de limpeza e esterilização do produto.

Produto estéril

Método de esterilização:

As Pinças para transplante capilar deverão ser esterilizados sob a forma de calor saturado (autoclave) a temperatura de 135°C durante 3 a 18 minutos de acordo com as recomendações da norma iso 17664 (esterilização de produtos para saúde).

Condições de armazenamento

Temperatura: -10°C a 50°C

Umidade relativa máxima: 100%

Evitar choques mecânicos

Condições de transporte

Temperatura: -0°C a 70°C

Umidade relativa máxima: 100%

Evitar choques mecânicos

Condições para manipulação

Temperatura: -10°C a 40°C

Umidade relativa: 30% à 75%

Evitar choques mecânicos;

Advertências / precauções

Este produto deverá ser utilizado por profissional habilitado e com experiência em manipulação de instrumentais cirúrgicos. As pinças não devem ser guardados nos mesmos locais onde se armazena produtos químicos, que podem exalar vapor corrosivo.

Toda pinça deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado. A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza. Uma vez esterilizado, as pinças devem ser abertas somente no centro cirúrgico, em condições assépticas. Ao receber o material verificar se a pinça encontra-se íntegro.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DA UTILIZAÇÃO

Informações gerais:

Nome técnico: PINÇA PARA TRANSPLANTE CAPILAR ERTIP

Fabricado por: ER TIBBI URUNLER SAGLIK HIZ. PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI.

Endereço: HALIDE EDIP ADIVAR MH. AKAR CAD. Nº 38, K:3 DAIRE 8 BOMONTI
SISLI - ISTANBUL, REPÚBLICA DA TURQUIA

Importado e distribuído por:

Doctus Equipamentos Médicos LTDA

CNPJ: 06696246/0001-26

Endereço: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526 – Boa Vista

CEP 82560-000 Curitiba – Paraná - Brasil

Telefone: +55 (41) 3357-9966

Responsável Técnico: Juliano Lindenberg Cordeiro CRF 21594PR

**ATENÇÃO: PRODUTO DE USO MÉDICO. DEVE SER UTILIZADO
POR PROFISSIONAL HABILITADO.**

VALIDADE: INDETERMINADO

REGISTRO ANVISA: 80690340044

Sandro Pilatti
Responsável Legal

Juliano Lindenberg Cordeiro
Responsável Técnico 21594/CRFPR